


Flocare® cuBBy™

Utbyttbar lavprofil gastrostomiport med 4 vinger til bruk i en allerede etablert kanal.

Flocare® cuBBy™ er en utbyttbar lavprofil gastrostomiport. De 4 vingene på den eksterne retensjonsplaten bidrar til optimal luftgjennomstrømning under porten og redusert trykk mot huden.

Flocare® cuBBy™ ligger stabilt og er skånsom mot gastrostomikanalen.

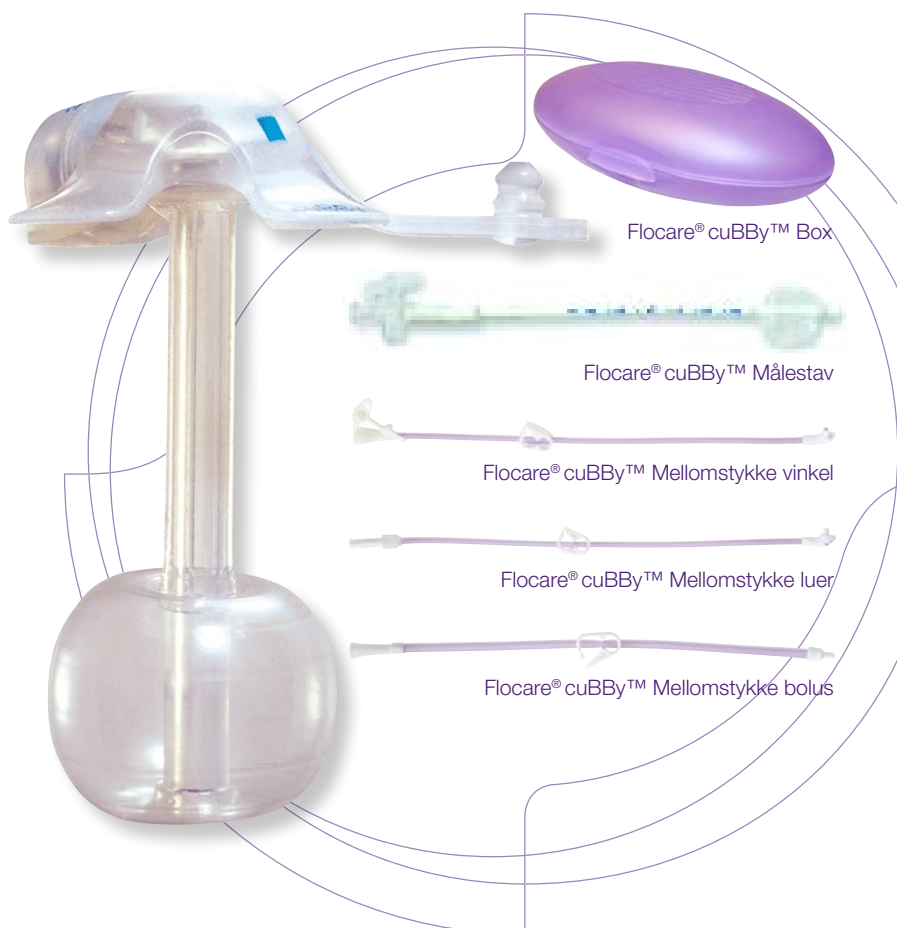


Bestillingsinformasjon (N.vnr = Nutricias varenummer, A.vnr = Apotekbransjens varenummer, S.ap/sy = Salgsenhet til apotek/sykehus)

Produkt		N.vnr	A.vnr	S.ap/sy
Flocare® cuBBy™ Ch 12	1.0 cm	35447	902289	1 sett
	1.5 cm	35452	868027	1 sett
	2.0 cm	35453	839445	1 sett
	2.5 cm	35454	906105	1 sett
	3.0 cm	35455	875750	1 sett
	3.5 cm	35456	952873	1 sett
Flocare® cuBBy™ Ch 14	1.0 cm	35431	851316	1 sett
	1.5 cm	35432	864440	1 sett
	2.0 cm	35433	845193	1 sett
	2.5 cm	35434	879054	1 sett
	3.0 cm	35435	803948	1 sett
	3.5 cm	35436	914783	1 sett
	4.0 cm	35437	907978	1 sett
4.5 cm	35438	931351	1 sett	
Flocare® cuBBy™ Ch 16	1.0 cm	35457	900643	1 sett
	1.5 cm	35458	954135	1 sett
	2.0 cm	35459	818069	1 sett
	2.5 cm	35460	852975	1 sett
	3.0 cm	35461	986161	1 sett
	3.5 cm	35462	972241	1 sett
	4.0 cm	35463	941565	1 sett
	4.5 cm	35464	893678	1 sett
Flocare® cuBBy™ Ch 18	1.0 cm	35439	842451	1 sett
	1.5 cm	35440	873104	1 sett
	2.0 cm	35441	873527	1 sett
	2.5 cm	35442	825008	1 sett
	3.0 cm	35443	910961	1 sett
	3.5 cm	35444	870783	1 sett
	4.0 cm	35445	943094	1 sett
	4.5 cm	35446	843520	1 sett

Produkt		N.vnr	A.vnr	S.ap/sy
Flocare® cuBBy™ Ch 20	1.0 cm	35465	930952	1 sett
	1.5 cm	35466	861055	1 sett
	2.0 cm	35467	989102	1 sett
	2.5 cm	35468	951975	1 sett
	3.0 cm	35469	862072	1 sett
	3.5 cm	35470	868644	1 sett
	4.0 cm	35471	878147	1 sett
	4.5 cm	35472	834984	1 sett
	Flocare® cuBBy™ Ch 24	1.0 cm	35473	840359
1.5 cm		35474	917649	1 sett
2.0 cm		35475	908238	1 sett
2.5 cm		35476	850209	1 sett
3.0 cm		35477	996665	1 sett
3.5 cm		35478	894088	1 sett
4.0 cm		35479	806356	1 sett
4.5 cm		35480	848071	1 sett
Produkt				
Flocare® cuBBy™ Målestav	35762	898950	5 stk.	
Flocare® cuBBy™ Mellomstykke vinkel	35763	816590	5 stk.	
Flocare® cuBBy™ Mellomstykke luer	35764	936726	5 stk.	
Flocare® cuBBy™ Mellomstykke bolus	35765	913861	5 stk.	
Flocare® cuBBy™ Box	105816		10 stk.	

Flocare® cuBBy™ med mellomstykke består av:

- A: Ballongen
- B: Matingsporten med anti-refluks ventil
- C: Ballonginflasjonsporten
- D: Vingene
- E: 90° adapter på mellomstykke (Vinkel og luer mellomstykke)
(Bolus mellomstykke har en rett adapter).
- F: Klemme
- G: Universal konektor

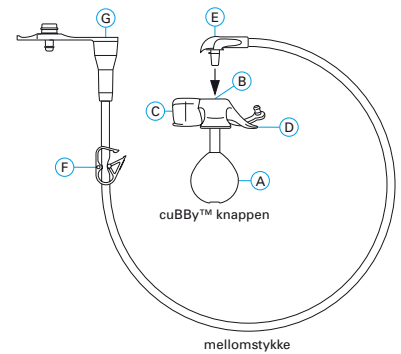

- Størrelser:** Ch 12, 14, 16, 18, 20 og 24 i ulike lengder. Se bestillingsinformasjon.
- Materiale:** Flocare® cuBBy™ i medisinsk silikon. Flocare® cuBBy™ Mellomstykker er i DEHP-fri PVC.
- Emballasje:** Enkeltvis sterilt pakket. Selges som sett som består av en gastrostomiport, et kompress, en 6 ml sprøyte og et vinkel mellomstykke.
- Indikasjon:** Langtids sondeernæring via en etablert gastrostomi. Spesielt velegnet for pasientgrupper som fysisk og psykisk utviklingshemmede barn og voksne, pasienter med demens og ellers ambulante pasienter. Ventrikkeldekompressjon.
- Kontraindikasjoner:** Der hvor stomikanalen ikke er etablert eller hvor det er infeksjon rundt stomien. Ascites. Peritoneal karsinom.
- Holdbarhet:** 60 måneder fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato på pakningen.
- Oppbevaring:** Lagres ved romtemperatur.
- Brukstid:** Kan anvendes så lenge den fungerer, gjennomsnitt brukstid er ca. 3 mnd. Brukstid kan variere mye avhengig bl.a. av mengde magesyre, medisiner og type sondeemat som gis.

Fullstendig veiledning på norsk om skifte, stell og bruk av Flocare® cuBBy™ følger med hvert sett.

Bruerveiledning Flocare® cuBBy™:

Daglig:

1. Sjekk stomien om den er rød eller hoven. Vask, skyll og tørk huden godt rundt stomien.
2. Snu knappen daglig 180°.
3. Kontroller avstand mellom huden og knappen. Det skal være et mellomrom på ca. 2-3 mm. Dersom det utvikles mindre mellomrom enn 2 mm, skal utbytting med en lengere knapp vurderes.
4. Det anbefales å kontrollere plasseringen med pH papir hver gang man kobler til en ny emballasje med sondeernæring, dersom det er tvil om knappens plassering og minst 3 ganger daglig. pH skal være < 5,5.

Ukentlig:

Kontroller vanninnholdet i ballongen ukentlig. Om nødvendig etterfyll volumet av vann til den foreskrevne mengden.

Ved mating:

1. Åpne matingsporten på knappen.
2. Koble adapter på mellomstykket til matingsport. Firkanten på adapteren og den blå streken på matingsporten skal passe sammen. Etter tilkobling, snu adapteren med klokkeretning i 90°.
3. Koble enteralt ernæringssett til mellomstykket. Skyll knappen med 20-40 ml vann gjennom medisineringsporten på det enterale ernæringssettet, mellomstykket og knappen. Deretter gi maten.
4. Etter avsluttet sondeernæring, skyll igjen med 20-40 ml vann gjennom medisineringsporten på det enterale ernæringssettet.
5. For å frakoble mellomstykket fra knappen, vri mellomstykket mot klokkeretning slik at firkanten på adapteren passer til den blå streken på matingsporten og fjern adapteren fra matingsporten. Hold knappen nært til huden. Lukk matingsporten til knappen med kapselen.

Stell av Flocare® cuBBy™:

Det er ikke nødvendig å ta Flocare® cuBBy™ ut av stomikanalen for regelmessig vask. Unødvendig skifte av knappen kan forårsake irritasjon av stomikanalen.

Ved fjerning av Flocare® cuBBy™:

Ta vannet ut av ballongen ved hjelp av sprøyten og trekk den forsiktig ut av stomikanalen.

Dersom knappen ved et uhell skulle falle ut av stomikanalen, skal man umiddelbart sette inn en ny Flocare® cuBBy™ eller G-tube (med samme Charrière) for å holde stomikanalen åpen.